


Возьмите образец крови пациента (артериальная, венозная, капиллярная).

Проведите соответствующую подготовку образца (тщательно перемешивайте образец).

Перед проведением анализа из шприца удалите первую порцию крови (содержимое канюли)

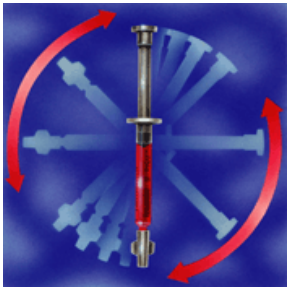

X 5




X 5



X 5

На анализаторе: 1. Выберите «тип пробы», соответствующий анализируемому образцу


2. Нажмите кнопку «GO» и проведите анализ

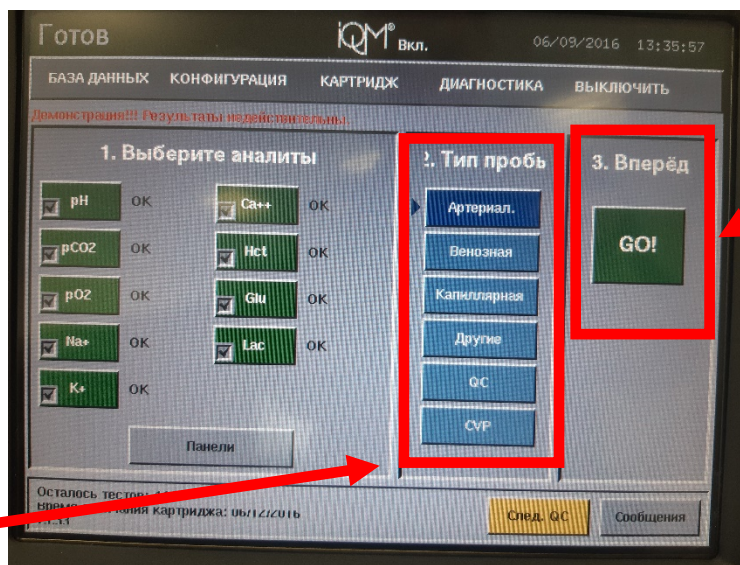

1

2

Для проведения анализа поднесите шприц/капилляр к пробозаборной игле и нажмите ОК. Удалите образец после звукового сигнала. Внесите информацию о пациенте (ФИО, температуру, FiO2), если требуется

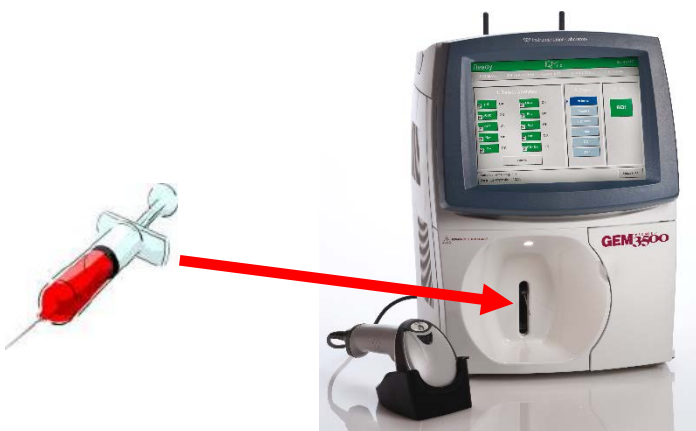

После получения результата нажмите «ПРИНЯТЬ». Результат распечатается автоматически.

Утилизируйте образец и очистите при необходимости рабочую зону анализатора от капель крови.