


**ВОЗЬМИТЕ ОБРАЗЕЦ КРОВИ ПАЦИЕНТА [АРТЕРИАЛЬНАЯ, ВЕНОЗНАЯ, КАПИЛЛЯРНАЯ]
ПРОВЕДИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПОДГОТОВКУ ОБРАЗЦА.
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ АНАЛИЗА УДАЛИТЕ ПЕРВУЮ ПОРЦИЮ КРОВИ ИЗ ШПРИЦА.**

ПЕРЕМЕШАЙТЕ КРОВЬ В ШПРИЦЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛИТЬ ПЕРВЫЕ КАПЛИ ИЗ ШПРИЦА ПЕРЕД АНАЛИЗОМ!!

НА АНАЛИЗАТОРЕ:

- 1. ВЫБЕРИТЕ «ТИП ПРОБЫ», СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АНАЛИЗИРУЕМОМУ ОБРАЗЦУ**
- 2. НАЖМИТЕ КНОПКУ «GO» И ПРОВЕДИТЕ АНАЛИЗ.**

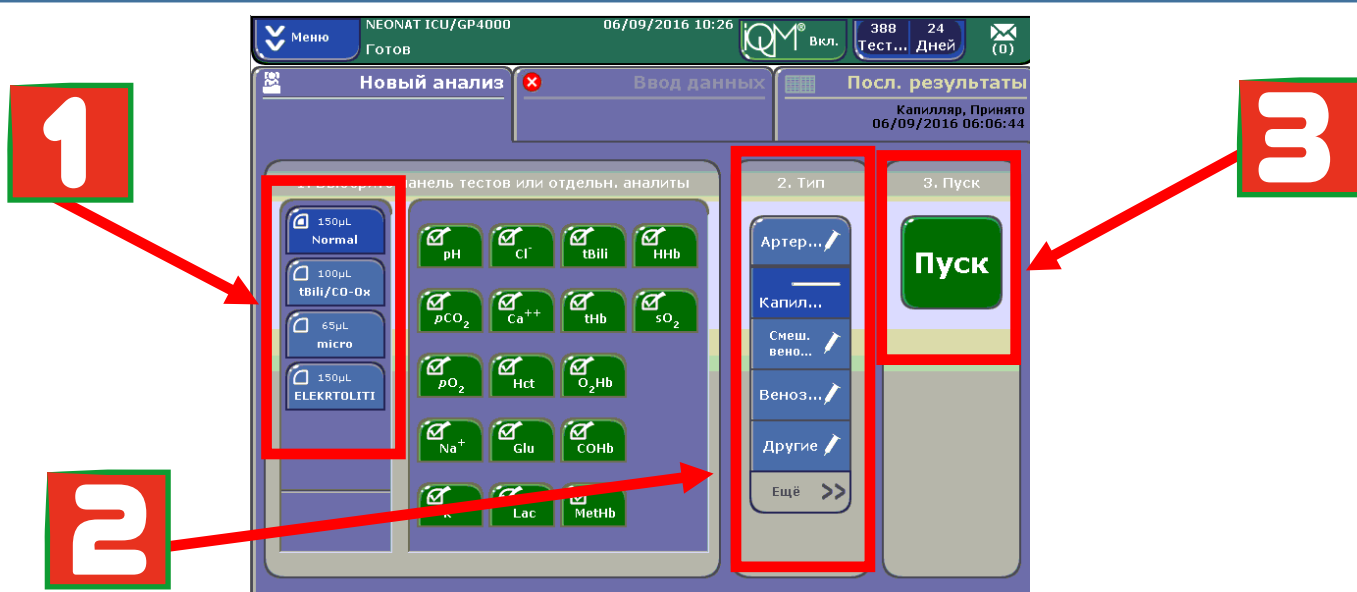

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ПОДНЕСИТЕ ШПРИЦ/КАПИЛЛЯР К ПРОБОЗАБОРНОЙ ИГЛЕ И
НАЖМИТЕ «ОК». УДАЛИТЕ ОБРАЗЕЦ ПОСЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА.
ВНЕСИТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ПАЦИЕНТЕ [ФИО, ТЕМПЕРАТУРУ, FIO2], ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ.**



**ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА НАЖМИТЕ «ПРИНЯТЬ».
РЕЗУЛЬТАТ РАСПЕЧАТАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ОБРАЗЕЦ И ОЧИСТИТЕ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАБОЧУЮ ЗОНУ АНАЛИЗАТОРА ОТ КАПЕЛЬ КРОВИ.**

НЕ ОТКЛЮЧАТЬ АНАЛИЗАТОР ОТ СЕТИ!