

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА АНАЛИЗАТОРЕ i-STAT®

POINT OF CARE



- 1 ВКЛЮЧИТЕ АНАЛИЗАТОР i-STAT
- > нажмите кнопку 2 для начала исследования на i-STAT
- 2 ПОДГОТОВЬТЕ КАРТРИДЖ
- отсканируйте/введите идентификационный номер оператора и пациента до начала сканирования упаковки картриджа
- 3 АККУРАТНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ ОБРАЗЕЦ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ КАРТРИДЖА
- не используйте первые несколько капель образца крови (кроме случаев, когда кровь взята из пальца и используется капилляр)
- 4 НАПОЛНИТЕ КАРТРИДЖ ДО **МЕТКИ ЗАПОЛНЕНИЯ**
- примеры см. ниже
- 5 ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ КАРТРИДЖА
- держите картридж с двух сторон
- не прикасайтесь к сенсорам картриджа
- убедитесь, что он плотно закрыт; вы услышите щелчок
- 6 ВСТАВЬТЕ ЗАПОЛНЕННЫЙ КАРТРИДЖ
- поставьте анализатор на ровную, не вибрирующую поверхность, чтобы начать исследование
- НЕ передвигайте его, пока исследование не завершится

МЕТКИ ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТРИДЖА В УВЕЛИЧЕННОМ ВИДЕ



В данном материале приведен только общий обзор процесса выполнения исследования на анализаторе i-STAT. Полную информацию о продукции i-STAT System и пользовательскую документацию можно получить на веб-сайте www.pointofcare.abbott после регистрации. Если вы хотите получать последнюю информацию о диагностике рядом с пациентом, подпишитесь на рассылку по электронной почте.

РУ № РЗН 2015/2358 от 25.05.2020
 РУ № ФСЗ 2011/10992 от 20.11.2019
 РУ РК-МТ-7№014159
 дата гос. регистрации 02.02.2015г.
 действительно до 02.02.2022г.
 дата внесения изменений и номер приказа от 14.10.2015г. №926
 Информация исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Подлежит распространению только в рамках мероприятий, связанных с повышением профессионального уровня медицинских и фармацевтических работников, включая специализированные выставки, конференции, симпозиумы и т.п.



ООО «МедТехСити»,
 199004, г. Санкт-Петербург,
 пер. Биржевой д.2 лит.А
 Тел.: +7 (812) 309-89-86;
www.medtechcity.ru
www.abbottpointofcare.com



Только для диагностики in vitro.
 Описание выполнения исследования на анализаторе i-STAT 1 — 2809 Rev 1 05/20
 Чистите устройство согласно внутренним процедурам/требованиям, установленным в вашем учреждении.

i-STAT является зарегистрированным товарным знаком группы компаний Abbott в различных юрисдикциях.